

# **OMRON connect**

## 設定ガイド

OMRON connectをご利用の場合は、RenoBodyでOMRON connectと連携設定する前にOMRON connectアカウントを作成してください。


## 1 OMRON connectアプリの設定

画面の案内に従い、活動量計・体重組成計を設定する



## 2 OMRON connectアプリ連携設定

OMRON connectアプリメニューより、「コンテンツ」>「+コンテンツ追加」をタップし、ヘルスケア連携の「連携設定」をタップ

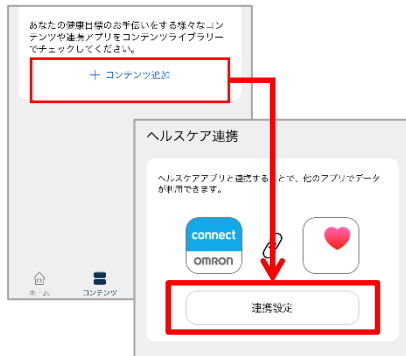

## 3 OMRON connectとヘルスケアの連携①

「ヘルスケアデータを書き込み」をONにし、「全データ書き込み」をタップ



## 4 OMRON connectとヘルスケアの連携②

書き込み許可のダイアログで「OK」を選択  
※全データの書き込みを許可しなかった場合、ヘルスケアにデータが送られません



## 5 OMRON connectとヘルスケアの連携③

全データ書き込みが開始し、「書き込み完了」となったら「閉じる」をタップし、ホームに戻る




## 6 RenoBodyアプリの設定

RenoBodyアプリMENU>デバイス設定で「OMRON Connect」または「iOSヘルスケア」に変更し「設定する」をタップ ※OMRON Connect選択時はOMRON活動量計のデータのみを取得します



## 7 RenoBodyとiOSヘルスケアの連携

すべてのカテゴリを「ON」、またはデータ連携する項目を選択し、「許可」をタップ

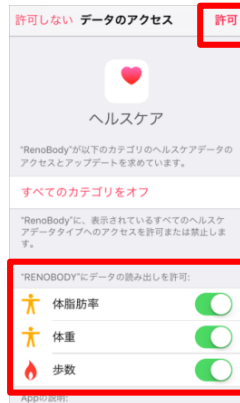

## 8 設定完了

- 設定完了後より計測したデータがRenoBodyに反映します。
- 活動量計の歩数は、RenoBodyに自動で反映しません。

OMRON connectアプリ、およびiOSヘルスケアアプリに歩数が同期されていることを確認後、RenoBodyを起動し歩数を更新してください。

# OMRON connectアプリ 初期登録手順 <Android>

OMRON connectをご利用の場合は、RenoBodyでOMRON connectと連携設定する前にOMRON connectアカウントを作成してください。


## 1 OMRON connectアプリの設定

画面の案内に従い、  
活動量計・体重組成計を設定する



## 2 OMRON connectアプリ連携設定

OMRON connectアプリメニューより、「コンテンツ」>「+コンテンツ追加」をタップし、アプリ連携の「連携アプリ・サービス」をタップ

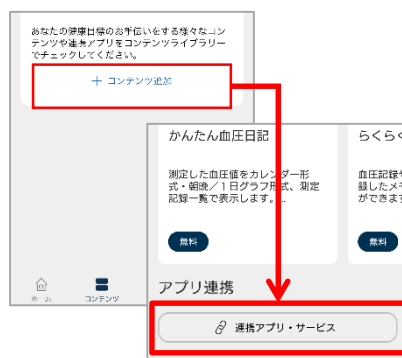

## OMRON connectとRenoBodyの連携①

「RenoBody(GooglePlay版)」をタップ



## 4 OMRON connectとRenoBodyの連携②

「同意する」をタップ



## 5 RenoBodyアプリの設定 歩数データ連携

RenoBodyアプリMENU>デバイス設定で「OMRON connect」を選択し、「設定する」をタップ



## 6 RenoBodyアプリの設定 体重データ連携

<体重データを連携する場合>

RenoBodyアプリMENU>デバイス設定画面を下にスクロールし、体重連携設定の「OMRON connect」をチェックし、「設定する」をタップ



## 7 設定完了

- 設定完了後より計測したデータがRenoBodyに反映します。  
※設定前に計測されたデータは反映しません。
- 活動量計の歩数は、RenoBodyに自動で反映しません。

OMRON connectアプリに歩数が同期されていることを確認後にRenoBodyを起動し、歩数を更新してください。